




Kavität zur Amalgamfüllung präparieren, reinigen und trocknen.

Prepare cavity for filling with amalgam, clean and thoroughly dry it.

Préparer la cavité pour l'obturation à l'amalgame, nettoyer et sécher.

Preparar la cavidad para la obturación con amalgama, limpiar y secar cuidadosamente.

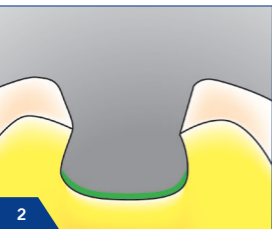


In tiefen Kavitäten und in Pulpennähe Unterfüllung bzw. Pulpenschutz legen.

Use a lining or pulp protection in deep cavities and in the proximity of the pulp.

A proximité de la pulpe ou pour des cavités profondes placer un fond de cavité ou une protection de la pulpe.

Aplicar un relleno de base o una protección pulpar en cavidades profundas y en proximidad de la pulpa.

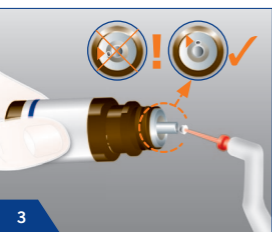


Amalgam Liner tropfenweise auf einen Einmalpinsel oder Pele Tim übertragen.

Dispense Amalgam Liner drop by drop on a disposable brush or Pele Tim.

Verser l'Amalgam Liner goutte à goutte sur un pinceau jetable ou sur Pele Tim.

Dispersar Amalgam Liner gota por gota en un pincel de un solo uso o en Pele Tim.

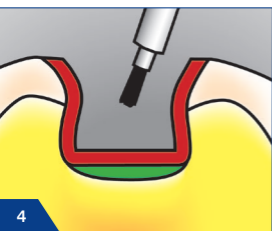

Alle Dentinflächen bzw. Unterfüllungen der getrockneten Kavität bis zum Rand mit Amalgam Liner touchieren.


Touch all dentine surfaces and linings of the dried cavity up to the rim with Amalgam Liner.

Appliquer l'Amalgam Liner sur toutes les surfaces de la dentine ou fonds de cavités de la cavité séchée (jusqu'au bord).

Aplicar el Amalgam Liner en las superficies de la dentina resp. rellenos de base de la cavidad secada hasta el borde.

Amalgam Liner Instructions

VOCO

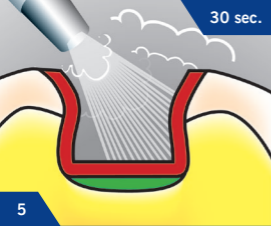


5

Mit dem Luftbläser den Lack
ca. 30 Sek. vorsichtig trocknen

Carefully dry the varnish with the air-jet
(approx. 30 sec.) ...

Sécher le vernis soigneusement au jet
d'air (approx. 30 sec.) ...

Secar la laca cuidadosamente con la
jeringa de aire (aprox. 30 seg.) ...

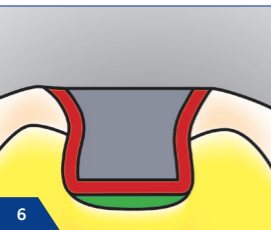

6

... und anschließend die Amalgamfüllung
legen.

... and then place the amalgam filling.

... et appliquer l'obturation à
l'amalgame.

... y luego aplicar la obturación de
amalgama.



7

Zusätzlich die frische Amalgamfüllung
mit Amalgam Liner versiegeln.

The surface of a fresh amalgam
filling can additionally be sealed
with Amalgam Liner.

Sceller la nouvelle obturation à
l'amalgame additionnellement
avec Amalgam Liner.

La obturación de amalgama fresca
puede ser sellada adicionalmente con
Amalgam Liner.

**Bitte ausführliche Gebrauchsinformation
beachten.**

Please follow detailed instructions for use.

Veillez observer les modes d'emploi détaillés.

**Por favor, observen las instrucciones de uso
detalladas.**



CE 0482

VOCO